



THERMOCHIP

MEHR ALS EINE NUMMER

38,7 °C

040098528120111



MEHR. WERT.
INNOVATION.



DER MEHR-WERT-CHIP


KAPSEL

Glaszylinder, gewährleistet optimalen Schutz und Biokompatibilität

ANTENNE

CHIP

mit einmaliger 15-stelliger Identifikationsnummer und Temperatursensor

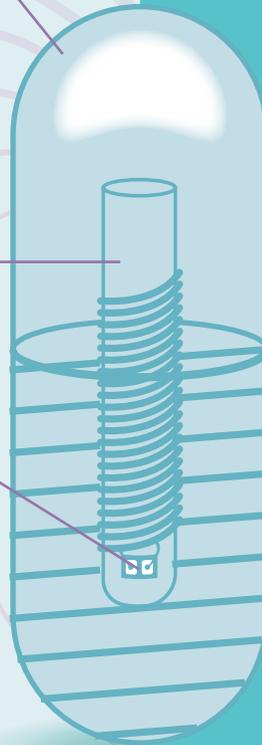

THERMOCHIP


Gemäß ISO Standards und zertifiziert durch das International Committee of Animal Recording

Identifikation per Chip ist Standard.

Der Thermo chip kann mehr

- Identifikation und **gleichzeitige Messung* der Körpertemperatur an der Implantations-Stelle** im Bereich von 33 – 43 °C
- **Temperatur anzeigen mit einem Tastendruck – bei jeder Vorstellung des gechipten Tieres oder auch als Monitoring**
- **Einfache Verfolgung der physiologischen Temperaturintervalle und individuellen Temperatur-Profile**

* Die Messung der Rektaltemperatur ist bei Tieren Goldstandard.

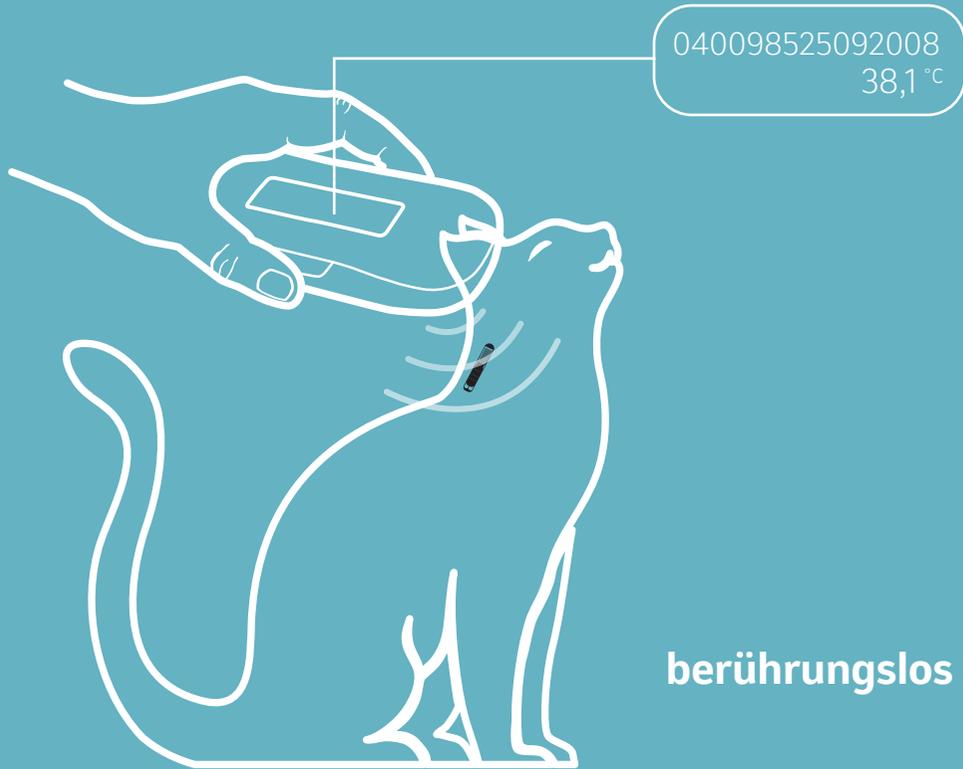

FÜR EIN INDIVIDUELLES TEMPERATURPROFIL



stressfrei



in wenigen
Sekunden



bei jeder
Untersuchung

berührungslos

UNIVERSAL MICROCHIP READER

- Leicht und handlich im Hosentaschenformat
- Vibration quittiert den erfolgreichen Messvorgang - lautlos
- Lesefähigkeit aller gängigen Mikrochips
- Automatisches Abschalten nach 30 Sekunden



GLOBAL POCKET READER PLUS


- Speichert bis zu 3.000 ID-Datensätze
- Kompatibel zu allen Mikrochip-Technologien
- Sehr robust
- Download- und Export-Funktion

THERMOCHIP FÜR KLEINTIERE UND PFERDE

Winziger passiver **RADIOFREQUENZCHIP (RFID)**,
der erst durch das Lesegerät aktiviert wird.

THERMOCHIP MINI FÜR KLEINTIERE


CLASSIC SIZE:
2,12 mm x 13 mm

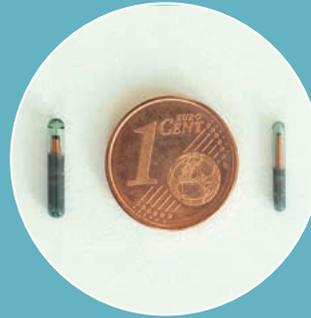

MINI SIZE:
1,5 mm x 10,7 mm



— **STERILER EINMAL-APPLIKATOR**
Ergonomisch und sicher,
„No return click system“ vermeidet
vorzeitigen Verlust des Mikrochips

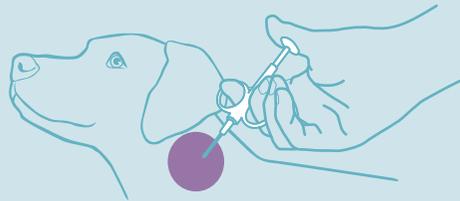


IMPLANTIERUNG:

Für Hunde, Katzen und Frettchen: die linke Halsseite.

Für Pferde: auf halber Höhe des Halses auf der linken Seite und 3-4 cm von der Rückenmittellinie entfernt.



Um Interferenzen zu vermeiden, darf
nur ein Chip implantiert werden.

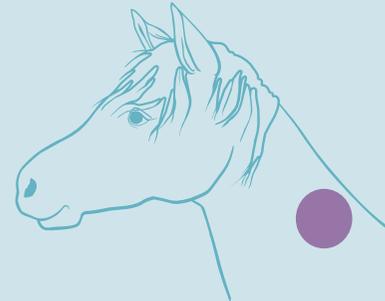

Jetzt bestellen

per Email:

bestellungspc@msd.de

oder per Fax:

0800 / 018 57 14



Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere

Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www.msd-tiergesundheit.at

